


Guldmann GH2 plafondgemonteerd tilsysteem, voorzien van een elektrisch kanteljuk.

Handbediening

- A: omhoog
- B: omlaag
- C: kanteljuk verstelling
- D: kanteljuk verstelling

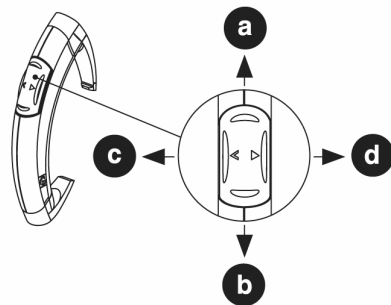

Let op!

Zorg er bij het omlaag gaan dat het spiraal snoer van de handbediening niet verstrikt raakt! Hierdoor kan het snoer beschadigen. Uiteraard geldt dit ook voor het spiraalsnoer van het kanteljuk

Indicatie lamp (groene cirkel):

- Aan: de lift is ingeschakeld
- Knippert: de accu's dienen te worden geladen
- Uit: de lift is (automatisch) uitgeschakeld




Opladen

De lift wordt door deze te parkeren op het laadstation gemarkeerd met een +- teken. Zodra de lift wordt geladen zal het gele indicatie lampje oplichten.



Beschrijving van de noodstop functie (rode koord)

Indien de GH2 niet reageert op de handbediening, kan het tillen of omlaag gaan worden onderbroken door aan het koordje van de noodstop te trekken ('STOP').

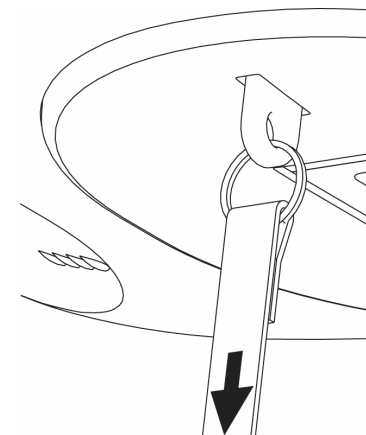

Rood koord aan de GH2 (noodstop):

- Een keer trekken > nood-stop
- Aanhoudend trekken > nood-omlaag

LET OP:


Indien de noodstop functie is geactiveerd, zal de GH2 niet meer functioneren omdat alle functies, c.q. alle elektronica hierdoor is geblokkeerd. Ook zal de lift hierdoor niet worden geladen. Om de lift weer te activeren, de gele knop van de noodstop/noodomlaag schakelaar terug (omhoog) drukken in de lift.

De draagband kan uitsluitend bevestigd worden met clips aan het kanteljuk.

Voorbeeld van een clip:



Clip open: Druk in voor het plaatsen van de paddestoel

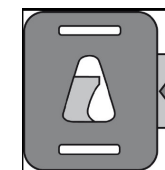

Clip dicht: De clip sluit zich automatisch af

Controleer of alle clips goed zijn aangebracht alvorens te gaan tillen, ook tijdens de til handeling checken!

!! LEES VOOR GEBRUIK EERST DE GEBRUIKSAANWIJZING!!