


Guldmann GH2 plafondgemonteerd tilsysteem

Handbediening

- a: omhoog
b: omlaag

Let op!

Zorg er bij het omlaag gaan dat het spiraal snoer van de handbediening niet verstrikt raakt! Hierdoor kan het snoer beschadigen.

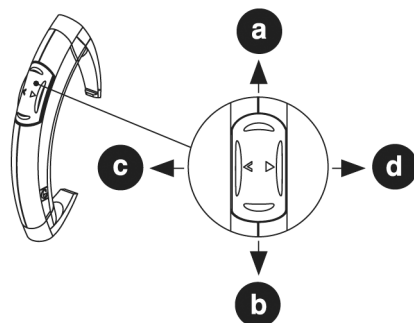

Indicatie lamp (groene cirkel):

- Aan: de lift is ingeschakeld
Knippert: de accu's dienen te worden geladen
Uit: de lift is (automatisch) uitgeschakeld



Opladen

De lift wordt door deze te parkeren op het laadstation gemarkeerd met een +- teken. Zodra de lift wordt geladen zal het gele indicatie lampje oplichten.




Beschrijving van de nood-stop functie (rode koord)

Indien de GH2 niet reageert op de handbediening, kan het tillen of omlaag gaan worden onderbroken door aan het koordje van de nood-stop te trekken ('STOP').

Rood koord aan de GH2 (noodstop):

- Een keer trekken > nood-stop
- Aanhoudend trekken > nood-omlaag

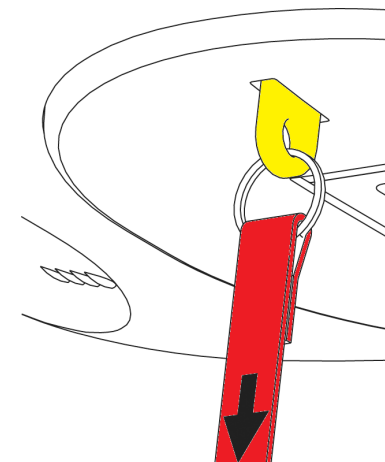


LET OP:

Indien de nood-stop functie is geactiveerd, zal de GH2 niet meer functioneren omdat alle functies, c.q. alle elektronica hierdoor is geblokkeerd. Ook zal de lift hierdoor niet worden geladen. Om de lift weer te activeren, de gele knop van de nood-stop/nood-omlaag schakelaar terug (omhoog) drukken in de lift, dit gaat gepaard met een harde "klik".

Draagband aanbrengen

Bevestig de schouderlussen aan de voorste haken.
Bevestig vervolgens de beenlussen gekruist aan de achterste haken.

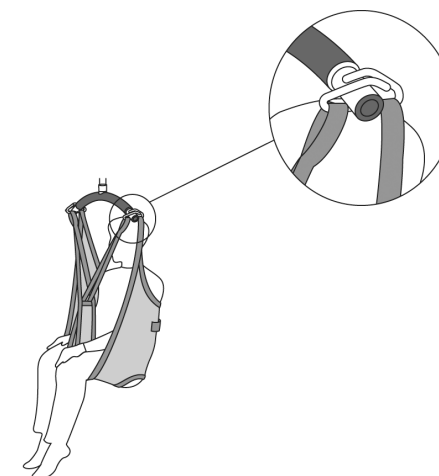

!! LEES VOOR GEBRUIK EERST DE GEBRUIKSAANWIJZING !!