

Het gebruik van uw tilband



Tilband omschrijving

Een tilband is een niet vormvaste lichaamsondersteuning voor het gebruik in combinatie met een personen tillift. Deze tilband, geleverd door JOYinCARE, wordt gefabriceerd volgens de EN-ISO10535 norm en is gekenmerkt met het CE keurmerk.

Type personenlift

Stalift

De cliënt heeft enige stafunctie. De stalift ondersteunt de cliënt in het gaan staan/zitten.

Uitvoering: Manueel/Touch&Move verrijdbaar.

Passieve tillift

De cliënt wordt volledig ondersteund door de tilband

Uitvoering: Manueel verrijdbaar/plafond/rail/Touch&Move verrijdbaar/elektrisch verrijdbare obesitas tillift.

Maximaal draaggewicht

Tilbanden geleverd door JOYinCARE, zijn gegarandeerd tot het tillen van cliënten tot 200 kg. Op maat gemaakte tilbanden en obesitas tilbanden kunnen daarop een uitzondering zijn.



Controleer vóór het gebruik van een door JOYinCARE geleverde tilband tot hoeveel kilogram tilgewicht de tillift gegarandeerd is. Indien de tillift een lager maximum tilgewicht heeft dan de tilband, dient u zich aan het tillift maximum te houden.

Baleinen


Indien de tilband geleverd is met baleinen dienen deze gebruikt te worden tijdens de transfers.

Tilband bevestiging

Een tilband kan uitsluitend bevestigd worden aan een juk van een personen tillift door middel van clips of lussen. Controleer altijd of alle clips of lussen goed zijn aangebracht alvorens te gaan tillen. Ook tijdens de tilhandeling nogmaals controleren.

A) Door middel van clips:

De clips van de tilband bevestigen aan het juk van de tillift: De clip kan geplaatst worden door het schuifje aan de zijkant van de clip in te drukken, de opening die nu ontstaat over het paddenstoeltje van het juk te plaatsen en daarna het schuifje los te laten. Controleer altijd voor het tillen of de clip goed dicht zit.

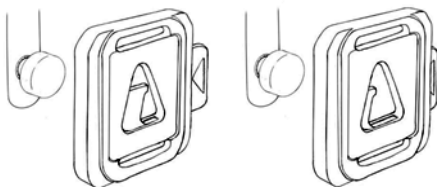


Verwijderen van de clip: Druk het schuifje volledig in en til de clip volledig over het paddenstoeltje heen.

Aanbrengen van de clip : Druk het schuifje volledig in en plaats de clip over het paddenstoeltje. Laat het schuifje los. Het schuifje sluit de clip af en is nu veilig geborgd op het paddenstoeltje van het juk. Controleer of de clip goed is aangebracht door aan de clip te trekken.

Conformiteit

De Careclip is een universele veiligheidsclip en kan veilig gebruikt worden in combinatie met elke gangbare tillift welke uitgerust is met een 4-punts juk waarvan de spanbreedte tussen de schouder ophangpunten maximaal 62 cm bedraagt en is uitgevoerd met paddenstoeltjes met een diameter van 6.8 mm tot en met 8.2 mm. Voor een veilig gebruik van de tilband dient de gebruikte tillift ook gefabriceerd te zijn volgens de EN-ISO 10535 norm.

B) Door middel van lussen:

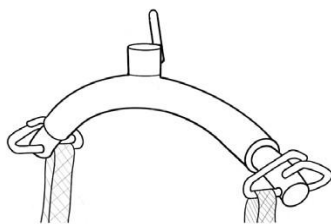

De lussen van de tilband bevestigen aan het juk van de tillift: Hang de lussen over de haken van het juk.

Conformiteit : De lussen aan de door JOYinCARE geleverde tilbanden kunnen veilig gebruikt worden in combinatie met elke gangbare tillift welke uitgerust is met een juk met haken.

Type tilbanden

Bij onduidelijkheid over de toepassing van en de keuze voor een type tilband altijd advies vragen aan de leverancier.



A) Rugsteunband/corsetband

Gebruik in combinatie met een stalift ter ondersteuning van het gaan staan of zitten. Controleer de stafunctie en schouderfunctie van de cliënt voor elke tilhandeling.

B) Toiletband



Gebruik in combinatie met een passieve tillift. Laat het zitgedeelte vrij. Controleer de schouderfunctie van de cliënt voor elke tilhandeling. Evalueer de toepassing van een toiletband regelmatig, in ieder geval na elke lichamelijke verandering van de cliënt, bijvoorbeeld afname van het lichaamsgewicht, na beenamputatie.

C) Standaard tilband



Gebruik in combinatie met een passieve tillift. Voor bad- en algemeen gebruik. Controleer de juiste maat bij gebruik zonder kleding.

D) VIP tilband



Gebruik in combinatie met een passieve tillift. Een verblijfstilband voor zit- of ligorthese. Loopt onder het zitvlak door. Kan niet in zitpositie aangebracht of weggehaald worden.

E) Longseat



Gebruik in combinatie met een passieve tillift. Een verblijfstilband voor zit- of ligorthese. Loopt onder het zitvlak door en heeft geen beenslips. Kan niet in zitpositie aangebracht of weggehaald worden. In combinatie met een 4 punts tiljuk alleen gebruiken in combinatie met een verbredingsstang.

F) Flex Toiletband




Toiletband alleen te gebruiken in combinatie met een Flexjuk.

Tilband aanbrengen in zitpositie

Bedoeld voor het tillen met een standaard tilband, rugsteunband en een toiletband.

1. Breng de standaard tilband aan tot op de (rol)stoel zitting. De toiletband tot aan de broekriem, de staliftband onder de schouderbladen.
2. Sluit de okselbevestiging van de toiletband. Sluit de buikfixatie van de rugsteunband. Plaats de armen van de cliënt over de staliftband.
3. Haal de beenslips langs de benen naar voren van de standaard tilband en toiletband.
4. Trek de standaard tilband onder de stuit van de cliënt door met één hand aan de beenslip te trekken en met de andere hand tegen de knie duwen.
5. Haal de beenslips van de standaard tilband en toiletband één voor één onder de bovenbenen door. Bij een tilband met lussen de lussen van de beenslips door de eerste lus kruisen.


6. Plaats de baleinen in de hoofdsteen en bevestig nu de tilband aan het juk

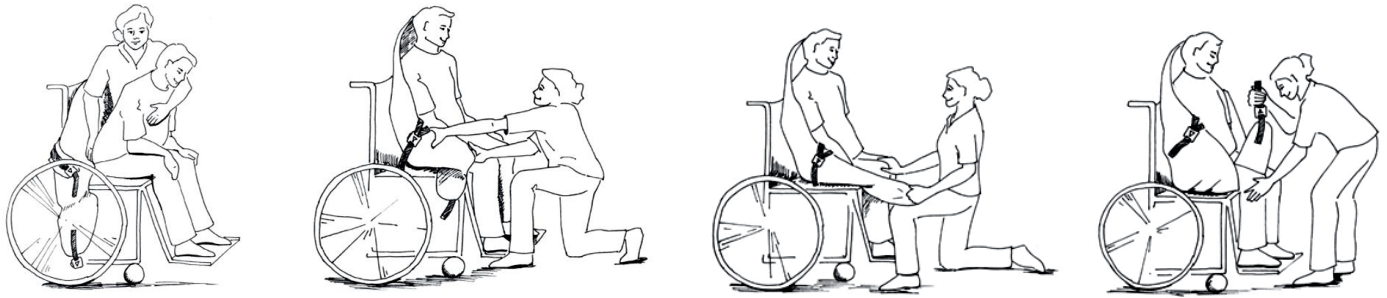

Tilband aanbrengen in ligpositie

Bedoeld voor het tillen met een standaard tilband, toiletband, VIP tilband, longseat.

1. Draai de cliënt op de zij. Leg de tilband achter de cliënt.
2. Bij de standaard tilband, breng aan van kruin tot stuit. Bij een VIP tilband of longseat, breng aan tot over de stuit. Bij een toiletband, breng aan tot aan de broekriem.
3. Breng daarna de beenslip en de schouderclip onder de cliënt door.

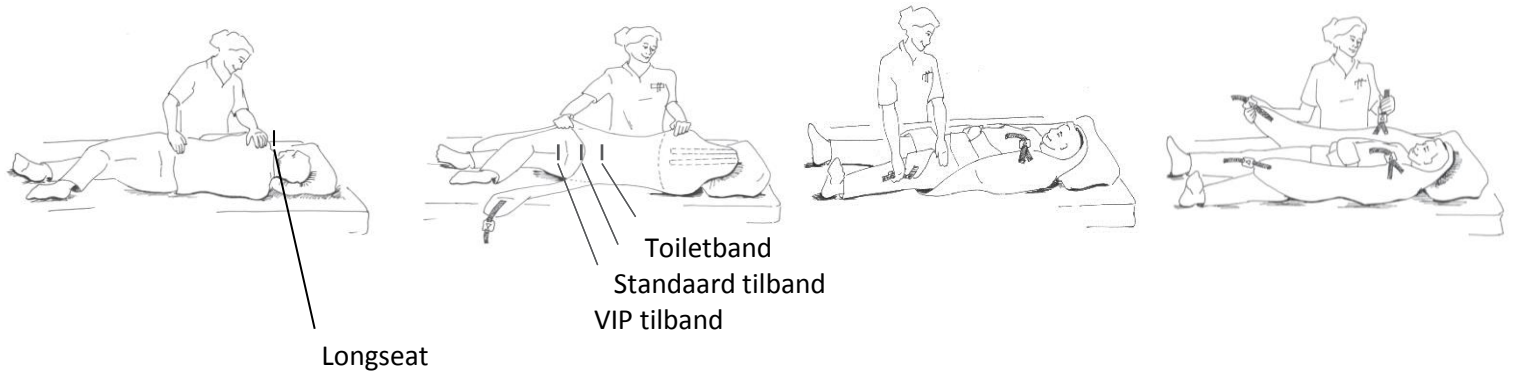

4. Draai de cliënt terug op de rug op de tilband. Trek de beenslip en schouderclip onder de cliënt uit. Haal de beenslips één voor één onder de bovenbenen door. Bij een tilband met lussen kruis je de lussen van de beenslips door de eerste lus.
5. Sluit de okselbevestiging van de toiletband. Plaats de baleinen in de hoofdsteen. Bevestig de tilband aan het juk.


Aanbrengen Flex Toiletband

1. Breng het juk in zitpositie.
2. Breng de toiletband aan achter de rug van de cliënt tot aan de broekriem.
3. Breng de beenslips daarna **van binnen naar buiten** onder de benen aan. Bevestig de 4 **oranje** veiligheidsclips aan de **oranje** paddenstoeltjes van het Flexjuk.
4. Hef de tillift omhoog door middel van de afstandsbediening. Zorg ervoor dat de benen- en schouderophanging gelijktijdig omhoog gaan, dit kan gecorrigeerd worden door het Flexjuk te laten kantelen.



Gebruik Airpockets

1. Controleer voor het maken van een transfer of de Airpockets in de hoofdsteen zijn aangebracht. Gedurende de dag blijven de Airpockets in de tilband.
2. Voor het oppompen van de Airpockets het meegeleverde pompje met de witte kant waarop staat "IN" op de Airpockets plaatsen.
3. Pomp de Airpockets voor iedere transfer volledig op door met behulp van het pompje minimaal 6 keer te knijpen.
4. De transfer kan nu gemaakt worden.
5. Laat de Airpockets leeglopen als de cliënt in de rolstoel zit of op bed ligt door het pompje met de zwarte kant waarop staat "OUT" op de Airpockets te plaatsen en in het pompje te knijpen tot dat alle lucht uit de Airpockets is weggelopen.
6. **Verwijder de Airpockets voor iedere wasbeurt!**

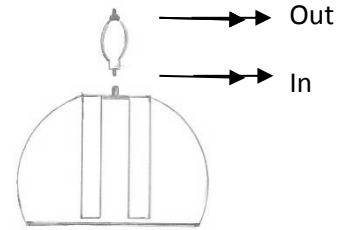

Maten tilbanden

Evalueer regelmatig of de maatvoering van de tilband past bij de cliënt. In ieder geval na elke lichamelijke verandering van de cliënt.

kleur	maat	lichaamslengte	borstomvang	Bij fors postuur	lichaamsgewicht
wit	XXS	<100 cm	53-67 cm	gebruik XS	tot 200 kg
bruin	XS	100-125 cm	67-76 cm	gebruik S	tot 200 kg
rood	S	125-145 cm	76-87 cm	gebruik M	tot 200 kg
geel	M	145-165 cm	87-97 cm	gebruik L	tot 200 kg
groen	L	165-185 cm	97-112 cm	gebruik LL	tot 200 kg
Paars	LL	165-185 cm	112-127 cm	gebruik XL	tot 200 kg
blauw	XL	>185 cm	112-127 cm	gebruik XXL	tot 200 kg
oranje	XXL	>185 cm	>127 cm	gebruik XXXL	Tot 200 kg
zwart	XXXL	>185 cm	>127 cm		Op aanvraag

Materialen : Polyester, bamboe, polipropyleen, nylon, Coolplus, Superfine.

Onderhoudsvorschriften




- Controleer vóór het in gebruik nemen van elke tilband de wasvoorschriften vermeld op het label van de tilband. Voor het behoud van de tilband is het beter om de tilband in een waszak te wassen.
- Verwijder de kunststof baleinen en Airpockets voor het wassen uit de tilband. Plaats de baleinen en de Airpockets weer terug in de tilband voordat u weer gaat tillen.
- Vermijd mechanische druk zoals rollen, wringen, trekken of persen tijdens de was-, en droogprocedure. Hierdoor kunnen onderdelen van de tilband beschadigen.
- Tilbanden niet heter wassen dan 60° C. Gebruik geen wasmiddel of schoonmaakmiddel met oplosmiddel of bleekmiddel. Tilbanden niet strijken. Was de tilband bij voorkeur in een wasnet.

Controleer elke tilband en clips of lussen vóór elk gebruik op scheuren en wijkende delen, naden, stiksels. Vul het tilband logboek na elke wasbeurt in, maar minimaal 1 keer per maand. Bij gebleken gebreken of enige twijfel de tilband direct vervangen.



U krijgt een garantie voor elke geleverde tilband van 2 jaar en/of 200 wasbeurten op basis van de garantiebepalingen.







Leverancier: JOYinCARE Tel.0341-768080
Industrieweg 47 8071 CS Nunspeet

⚠ Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing.
Gebruik de tilband alleen met een passend tiljuk. Kies de juiste maat en model voor iedere cliënt. Voor gebruik de tilband, clips en lussen controleren op gebreken
Bij gebreken de tilband niet gebruiken.

<p>CE</p> <p>Max tilgewicht</p> <p>Maat</p> <p>Materiaal</p> <p>Naam cliënt</p> <p>Ophanging</p> <p>Wasvoorschrift</p>	<p>Standaard tilgewicht 200 kg</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Model</p> <p>Verblifsband</p> <p>Vip</p> <p>Seamless</p> <p>All-day</p> <p>Standaard tilband</p> <p>Longseat</p> <p>Toiletband</p> <p>hoofdsteun</p> <p>buikfixatie</p> <p>flex</p> <p>Staliftband</p> <p>corset</p> <p>schuim</p> <p>Loopvest</p> <p>Special</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Maat</p> <p>XXX XS S M L LL XL XXL</p> <p>3 XL Obesitas 350kg</p> <p>Materiaal</p> <p>Polyester net</p> <p>Bamboestretch</p> <p>Polyester</p> <p>Cool Plus</p> <p>Superfine</p> <p>Afstandsbreisel</p> <p>Special</p> <p>Ophanging</p> <p>Lussen</p> <p>Clips</p> <p>Special</p> </td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">CE NEN 10535</p>	<p>Model</p> <p>Verblifsband</p> <p>Vip</p> <p>Seamless</p> <p>All-day</p> <p>Standaard tilband</p> <p>Longseat</p> <p>Toiletband</p> <p>hoofdsteun</p> <p>buikfixatie</p> <p>flex</p> <p>Staliftband</p> <p>corset</p> <p>schuim</p> <p>Loopvest</p> <p>Special</p>	<p>Maat</p> <p>XXX XS S M L LL XL XXL</p> <p>3 XL Obesitas 350kg</p> <p>Materiaal</p> <p>Polyester net</p> <p>Bamboestretch</p> <p>Polyester</p> <p>Cool Plus</p> <p>Superfine</p> <p>Afstandsbreisel</p> <p>Special</p> <p>Ophanging</p> <p>Lussen</p> <p>Clips</p> <p>Special</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; height: 100px;"> <p style="text-align: center;">Naam</p> </div>
<p>Model</p> <p>Verblifsband</p> <p>Vip</p> <p>Seamless</p> <p>All-day</p> <p>Standaard tilband</p> <p>Longseat</p> <p>Toiletband</p> <p>hoofdsteun</p> <p>buikfixatie</p> <p>flex</p> <p>Staliftband</p> <p>corset</p> <p>schuim</p> <p>Loopvest</p> <p>Special</p>	<p>Maat</p> <p>XXX XS S M L LL XL XXL</p> <p>3 XL Obesitas 350kg</p> <p>Materiaal</p> <p>Polyester net</p> <p>Bamboestretch</p> <p>Polyester</p> <p>Cool Plus</p> <p>Superfine</p> <p>Afstandsbreisel</p> <p>Special</p> <p>Ophanging</p> <p>Lussen</p> <p>Clips</p> <p>Special</p>			



Fabrikant: Confexion bv Tel.0592-268953
Industrieweg 14 9403 AA Assen

<p>B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9</p> <p>A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9</p> <p>T 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9</p> <p>C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9</p> <p>H 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9</p>	
--	--

Leverancier: JOYinCARE
Industrieweg 47 - 8071 CS Nunspeet
tel 0341- 768080 info@joyincare.com

Fabrikant: Confexion
Industrieweg 14 - 9403 AA Assen
tel 0592-268953 info@confexion.com