



## Verkorte handleiding combilock



Plaats de beweegbare rail voor de vaste rail en druk op de puls schakelaar (knop)



De veiligheidslotjes gaan nu “open” en de beweegbare rail zit vast voor de vaste rail



Rijd nu de lift ver genoeg door de veiligheidslotjes heen



Wanneer de lift volledig door de veiligheidslotjes is heen gegaan, is het nu veilig om op de puls schakelaar (knop) te drukken



De veiligheidslotjes zijn nu weer gesloten en u kunt uw transfer vervolgen