




Guldmann GH1 plafondgemonteerd tilsysteem Handbediening

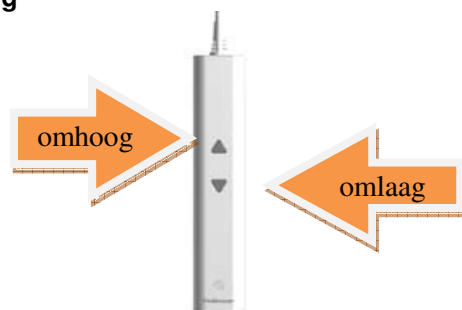


Let op!

Zorg er bij het omlaag gaan dat het spiraal snoer van de handbediening niet verstrikt raakt! Hierdoor kan het snoer beschadigen.

Laden van de GH1

Zet de handbediening op zijn kant en plaats hem op de twee pinnetjes van het oplaadstation. Duw vervolgens de rubberen hendel in de opening van het oplaadstation. Een klik geeft aan dat de handbediening op de juiste manier is geplaatst. Wanneer de handbediening correct op het oplaadstation staat, ontvangt u een akoestisch signaal van 3 piepjes. Dit betekent dat de lift nu oplaad.

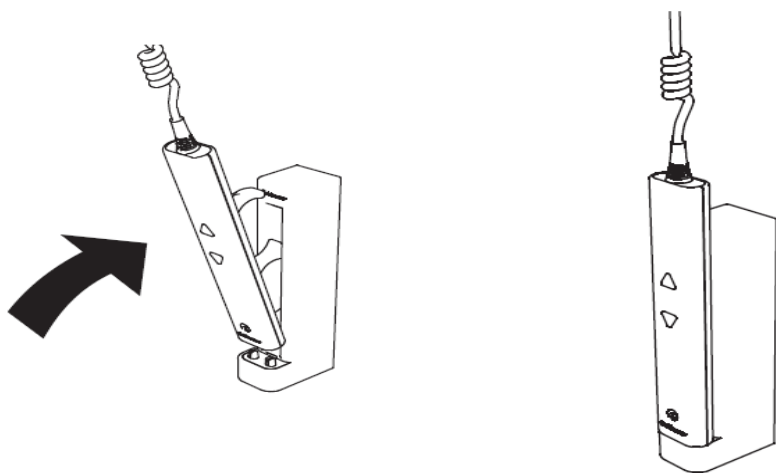


Beschrijving van de nood-stop functie (rode koord)

Indien de GH1 niet reageert op de handbediening, kan het tillen of omlaag gaan worden onderbroken door aan het koordje van de nood-stop te trekken

Rood koord aan de GH1 (noodstop):

- Een keer trekken > nood-stop
- Aanhoudend trekken > nood-omlaag

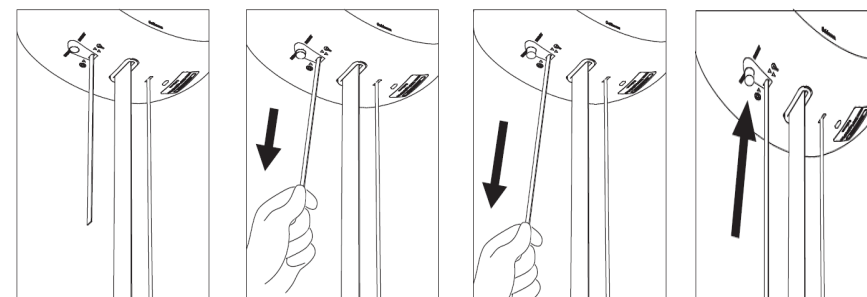


LET OP:

Indien de nood-stop functie is geactiveerd, zal de GH1 niet meer functioneren omdat alle functies, c.q. alle elektronica hierdoor is geblokkeerd. Ook zal de lift hierdoor niet worden geladen. Om de lift weer te activeren, de gele knop van de nood-stop/nood-omlaag schakelaar terug (omhoog) drukken in de lift.

Draagband aanbrengen

Bevestig de schouderlussen aan de haak.

Bevestig vervolgens de beenlussen gekrust aan de haak.

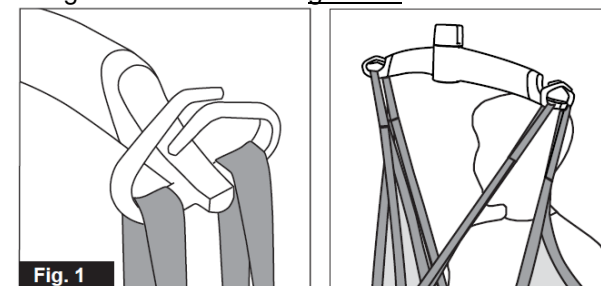

Let op: Controleer of de lussen correct zijn geplaatst in de ophanghaken van het juk. Wanneer u op de omhoog knop drukt van de afstandsbediening controleer dan of de lussen op de juiste positie in de haken blijven.

!! LEES VOOR GEBRUIK EERST DE GEBRUIKSAANWIJZING !!