



Verkorte handleiding charder weegunit

Lees voor het eerste gebruik eerst de originele handleiding


Aanzetten:

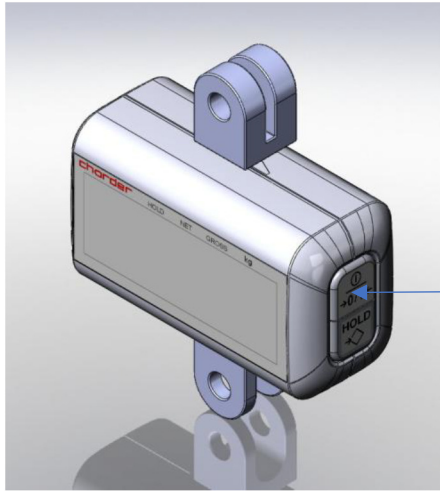

1. Druk op de bovenste knop om de weegunit aan te zetten. De weegunit telt af van 9 naar 0. Hierna is de weegunit klaar voor gebruik
2. Hang de tilband aan het juk en druk nogmaals op de bovenste knop. Als u de tilband van het juk afhaalt geeft de weegunit een negatief gewicht aan.

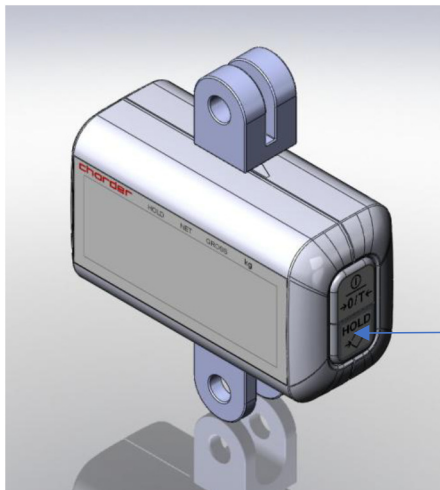

3. Bevestig de tilband met patiënt aan het juk en til de patiënt omhoog. U ziet nu het gewicht op het scherm. Dit is het netto-gewicht.
4. Druk op Hold om het gewicht vast te zetten.

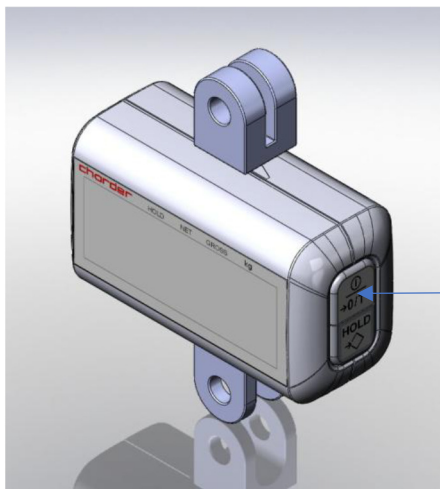

5. Nadat u klaar bent met tillen, zet u de weegunit uit door 3 seconden de bovenste knop in te drukken.