



Verkorte handleiding automatisch Combi Lock



Plaats de traverse rail zodat deze op één lijn ligt met de vaste rail.



Wanneer beide rails op één lijn liggen gaan de veiligheidsslotjes vanzelf open



Nadat u hebt gecontroleerd of de veiligheidssluiting is geactiveerd, plaatst u zichzelf vlak achter of voor de tilcassette. Het is nu veilig om de tilcassette door het Combi Lock te manoeuvreren.



Wanneer de tilcassette volledig door het Combi Lock heen is gegaan, is het veilig om de traverse te verplaatsen.



Opmerking: verplaats de traverse rail niet wanneer de tilcassette in deze positie staat, met de loopwieltjes tussen de veiligheidssluiting



Verkorte handleiding automatisch Combi Lock



Plaats de tilcassette op de gele marking ca. 1 meter vanaf het einde van de traverse rail en Combi Lock



Plaats de patiënt in de lengte / kijk in de lengterichting van de traverse en op een niveau waar u kunt duwen / vasthouden zoals op de afbeelding.

Om de rails uit te lijnen en de combi Lock in te schakelen, plaatst u uzelf op de zijkant van de patiënt zodat u loodrecht op de traverse-rail duwt of trekt.

Als de Combi Lock niet de eerste keer wordt ingeschakeld, verplaatst u de traverse-rail ongeveer ½ tot 1 meter van de combi lock-rail en probeer het opnieuw.



Wanneer de veiligheidssluiting is ingeschakeld, plaatst u zichzelf achter de patiënt en duwt u de traverse in de lengterichting door het Combi Lock. De patiënt kijkt nog steeds in de richting van de dwarsbalk.